



Одноразовая оро-назальная маска серии 6600 для CPAP/BiLevel вентиляции с антиасфиксическим клапаном и вентиляционными отверстиями



Характеристики...

Размеры: Large, Medium, Small, Extra Small, Petite

СВОЙСТВА ИЗДЕЛИЯ

- Пять размеров для широкого диапазона пациентов.
- Лицевая часть с новым лицевым уплотнительным фланцем является цельной частью маски, сделанной из прозрачного мягкого термопластового эластомера.
- Дизайн лицевой маски с анатомическими контурами с ребристым основанием для комфортного соединения без утечек.
- Антиасфиксический клапан для безопасности пациента - позволяет пациенту дышать комнатным воздухом в случае неисправности аппарата. Клапан открывается при давлении в маске < 3смН2О.
- Через микроскопические вентиляционные отверстия в порте рассеивается CO2.
- Поворачиваемый на 360° двойной соединительный порт с отсоединяемой частью для свободы движений пациента. Цветовая кодировка: прозрачный голубой.
- Легко регулируемый, легкий ремешок на голову с 4 тесемками для комфорта пациента доступен в трех размерах.
- Новые быстрозащелкиваемые клипсы для быстрого и простого надевания/снятия ремешка.
- Легкая, простая в эксплуатации, высококачественная маска с ремешком.
- Недорогая, одноразовая маска.

СПЕЦИФИКАЦИИ

МАТЕРИАЛЫ КОМПОНЕНТОВ (Рис. А)	
Лицевая часть с фиксирующими дужками	Термопластик эластомер, поликарбонат термопластик
Соединит. порт- угловой адаптер d=22мм	Поликарбонат термопластик, прозрачный голубой
Соединит. порт - антиасфиксический клапан	Прозрачный поликарбонат термопластик
Диафрагма	Силиконовая резина
Ремешок на голову	Пенополиуретан черный, нейлон UBL черный и синий
Крючок ремешка	Нейлон, черный
Клипсы тесемок ремешка (4), тризуб	Полипропилен, черный




Оро-назальная маска для CPAP/BiLevel вентиляции с ремешком

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


- **Предназначение:** Оро-назальные одноразовые (на 1 пациента) маски серии 6600, имеющие встроенные порты для выхода пассивного, постоянного потока используются с CPAP/BiLevel аппаратами для лечения абструктивного апноэ сна или с аппаратами ИВЛ, которые используют подобную конфигурацию, обеспечивающую давление в маске минимум 3 смН2О.
- **Показания к применению:** Данные маски предназначены для взрослых пациентов (весом более 30кг) для лечения обструктивного апноэ сна и любых других состояний, требующих CPAP/BiLevel или неинвазивной вентиляционной поддержки с давлением в маске большим или равным 3,0 смН2О в клиниках и других медицинских учреждениях.
- **Сфера применения:** Данные маски предназначены для применения в клиниках и других медучреждениях персоналом, прошедшим минимальный инструктаж или обучение использованию масок и приборов, к которым эти маски подсоединяются.
- **Предупреждения:**
 - а.) Федеральный закон разрешает продажу этого изделия только врачам или по их заказу.
 - б.) При низких давлениях CPAP/BiLevel вентиляции, поток, проходящий через вентиляционные отверстия маски, может быть недостаточным для выведения всего выдыхаемого газа из трубок. Может произойти повторное вдыхание некоторой части выдыхаемого газа.
 - в.) У пациентов с бородой могут наблюдаться утечки, необходимо сбрить волосы.
- **Предостережения:** читайте в инструкции по эксплуатации, поставляемой с изделием.
- **Противопоказания и осложнения:** читайте в инструкции по эксплуатации, поставляемой с изделием.

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры лицевой маски

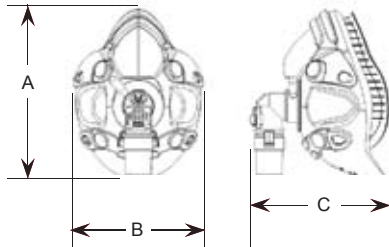


Объем мертвого пространства маски (мл) измерен до отверстий в соединительном порте				
Large	Medium	Small	Extra Small	Petite
154	136	110	99	89

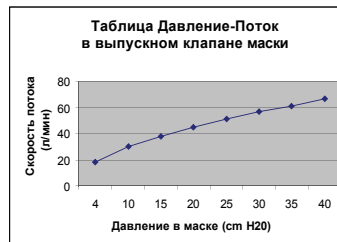

	РАЗМЕР МАСКИ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ - дюймы (мм)				
	LARGE	MEDIUM	SMALL	EXTRA SMALL	PETITE
A	5.9 (150)	5.5 (140)	5.2 (132)	4.8 (122)	4.6 (117)
B	4.2 (107)	4.16 (105)	4.05 (103)	3.95 (100)	3.9 (99)
C	4.7 (119)	4.46 (113)	4.32 (110)	4.2 (107)	4.04 (103)

КОМПОНЕНТЫ МАСКИ 6600 V2 Mask™

Рис. А

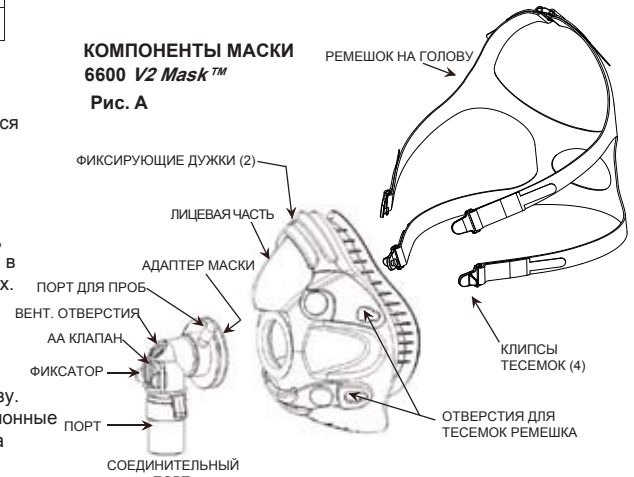

MAKERS OF RESPIRATORY VALVES SINCE 1938

HRI

www.rudolphkc.com

ИЗМЕРИТЕЛЬ РАЗМЕРА МАСКИ

MASK SIZING GAUGE

For Hans Rudolph, Inc. One-Nasal Vmask™ and V2mask™ Series Face Masks

Instructions: The mask should be placed over the nose and mouth and secured by the head straps. The mask should be adjusted until it fits snugly over the nose and mouth. The mask should be held in place by the head straps. The mask should be held in place by the head straps. The mask should be held in place by the head straps.

If between sizes, we recommend you use the smaller size.

PETITE

EXTRA-SMALL

SMALL

MEDIUM

LARGE

HANS RUDOLPH, Inc.
MAKERS OF RESPIRATORY VALVES SINCE 1938
8325 COLE PARKWAY, SHAWNEE, KANSAS 66227 U.S.A.
TEL: 785-955-1360 FAX: 785-955-1361
WWW.HANSRUDOLPH.COM
© 2010 Hans Rudolph, Inc.