



Многоразовая оро-назальная маска серии 7600 для CPAP/BiLevel вентиляции с антиасфиксическим клапаном и вентиляционными отверстиями

Характеристики...

Размеры: Large, Medium, Small, Extra Small, Petite

СВОЙСТВА ИЗДЕЛИЯ

- Пять размеров для широкого диапазона пациентов.
- Лицевая часть с новым лицевым уплотнительным фланцем является цельной частью маски, сделанной из прозрачной мягкой силиконовой резины.
- Дизайн лицевой маски с анатомическими контурами с ребристым основанием для комфортного соединения без утечек.
- Антиасфиксический клапан для безопасности пациента - позволяет пациенту дышать комнатным воздухом в случае неисправности аппарата. Клапан открывается при давлении в маске < 3смH2O.
- Через микроскопические вентиляционные отверстия в порте рассеивается CO2.
- Поворачиваемый на 360° двойной соединительный порт с отсоединяемой частью для свободы движений пациента. Цветовая кодировка: прозрачный голубой.
- Легко регулируемый, легкий ремешок на голову с 4 тесемками для комфорта пациента доступен в трех размерах.
- Новые быстрозащелкиваемые клипсы для быстрого и простого надевания/снятия ремешка.
- Легкая, простая в эксплуатации, высококачественная маска с ремешком.
- Многоразовые маски выдерживают стерилизацию паром в автоклаве, холодную химическую стерилизацию, пастеризацию и мытье в посудомоечной машине.

СПЕЦИФИКАЦИИ


МАТЕРИАЛЫ КОМПОНЕНТОВ (Рис. А)	
Лицевая часть с фиксирующими дужками	Силиконовая резина, поликарбонат термопластик
Соединит. порт- угловой адаптер d=22мм	Поликарбонат термопластик, прозрачный голубой
Соединит. порт - антиасфиксический клапан	Прозрачный поликарбонат термопластик
Диафрагма	Силиконовая резина
Ремешок на голову	Пенополиуретан черный, нейлон UBL серый и красный
Крючок ремешка	Нейлон, черный
Клипсы тесемок ремешка (4), тризуб	Полипропилен, черный

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


- **Предназначение:** Оро-назальные многоразовые маски для взрослых серии 7600, имеющие встроенные порты для выхода пассивного, постоянного потока используются с CPAP/BiLevel аппаратами для лечения абструктивного апноэ сна или с аппаратами ИВЛ, которые используют подобную конфигурацию, обеспечивающую давление в маске минимум 3 смH2O.
- **Показания к применению:** Данные маски предназначены для взрослых пациентов (весом более 30кг) для лечения обструктивного апноэ сна и любых других состояний, требующих CPAP/BiLevel или неинвазивной вентиляционной поддержки с давлением в маске большим или равным 3,0 смH2O дома, в клиниках и других учреждениях.
- **Сфера применения:** Данные маски предназначены для применения дома, в клиниках и других учреждениях персоналом, прошедшим минимальный инструктаж или обучение использованию масок и приборов, к которым эти маски подсоединяются.
- **Предупреждения:**
 - а.) Федеральный закон разрешает продажу этого изделия только врачам или по их заказу.
 - б.) При низких давлениях BiLevel вентиляции, поток, проходящий через вентиляционные отверстия маски, может быть недостаточным для выведения всего выдыхаемого газа из трубок. Может произойти повторное вдыхание некоторой части выдыхаемого газа.
 - в.) У пациентов с бородой могут наблюдаться утечки, необходимо сбрить волосы.
- **Предостережения:** читайте в инструкции по эксплуатации, поставляемой с изделием.
- **Противопоказания и осложнения:** читайте в инструкции по эксплуатации, поставляемой с изделием.

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры лицевой маски

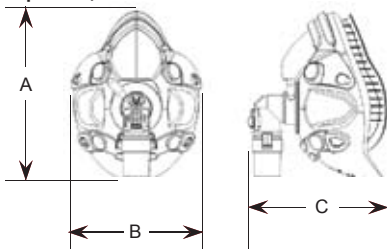

Объем мертвого пространства маски (мл) с угловым соединителем ВД 22мм				
Large 170	Medium 152	Small 126	Extra Small 115	Petite 105

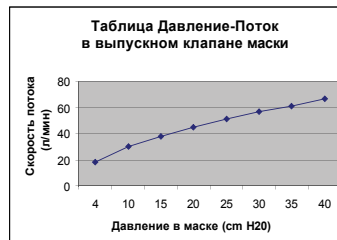


	РАЗМЕР МАСКИ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ - дюймы (мм)				
	LARGE	MEDIUM	SMALL	EXTRA SMALL	PETITE
A	5.9 (150)	5.5 (140)	5.2 (132)	4.8 (122)	4.6 (117)
B	4.2 (107)	4.16 (105)	4.05 (103)	3.95 (100)	3.9 (99)
C	4.7 (119)	4.46 (113)	4.32 (110)	4.2 (107)	4.04 (103)



Оро-назальная маска для CPAP/BiLevel вентиляции с ремешком

КОМПОНЕНТЫ МАСКИ 7600 V2 Mask™

Рис. А

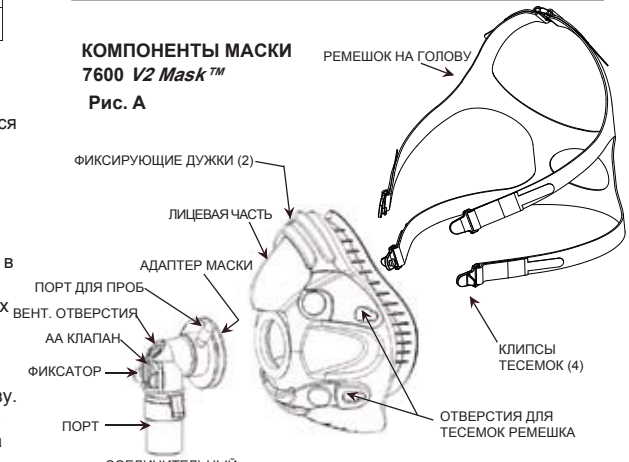

ИЗМЕРИТЕЛЬ РАЗМЕРА МАСКИ



If between sizes, we recommend you use the smaller size.

PETITE
EXTRA-SMALL
SMALL
MEDIUM
LARGE

